

# Test per il sesso del feto

## Istruzioni per l'uso

### Step 1: Prelievo di sangue


Eeguire un prelievo di sangue in vena utilizzando il protocollo standard. La provetta fornita contiene un additivo per aiutare a preservare il campione.



## Istruzioni per l'uso

### Step 2: Miscelare la Soluzione

Quando il prelievo di sangue è completato, mescolare accuratamente invertendo 10 volte.

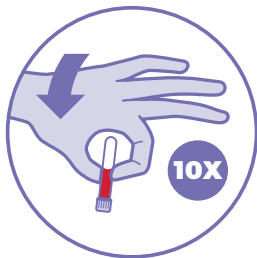

### Step 3: Garantire il funzionamento del campione

Dopo la raccolta, trasportare e conservare la provetta a temperatura compresa tra 6 ° C e 37 ° C. **NON CONGELARE.** Spedire immediatamente e non oltre 1 giorno dopo la raccolta del campione. Si consiglia di spedire ad inizio settimana per evitare il week-end. Il mancato rispetto di queste linee guida può comportare la necessità di un ricampionamento e un ritardo nell'emissione del risultato del test.



#### Step 4: Completare il modulo di richiesta per il test

Completare e firmare il **modulo di richiesta del test** incluso nel kit. Assicurarsi di includere tutte le informazioni, compreso il codice a barre del kit e il proprio indirizzo email, per ricevere il referto coi risultati. Informazioni mancanti o illeggibili ritarderanno i risultati. **Non scrivere sulla provetta.** Il codice a barre della provetta è tutto ciò che serve per identificare la parte testata.

#### Step 5: Impacchettare e spedire

Posizionare la provetta di raccolta nella piccola busta di plastica richiudibile del kit e sigillare. Adagiare saldamente la busta con il campione nella schiuma protettiva fornita e posizionare il tutto nella scatola del kit. Scansionare o inviare una foto del modulo di richiesta del test compilato e inviarlo tramite e-mail in modo che possiamo prenotare il ritiro tramite corriere.

Posizionare il modulo e la scatola del kit nella confezione FedEx Clinical Pak fornita.

Si prega di firmare e datare in basso a sinistra tutte le copie delle fatture commerciali (Commercial Invoice) allegate alla lettera di vettura nella busta sulla parte anteriore della busta FedEx e di riporle nella busta.

Faremo in modo che Federal Express ritiri il pacco e lo spedisca direttamente al laboratorio.